



HELICO DRY-TEST®

Ureazės testas *Helicobacter pylori* nustatymui diagnostikoje IVD

Ref.: HD001T

Naudojimosi instrukcija

HELICO DRY-TEST testas skirtas *Helicobacter pylori* nustatymui iš skrandžio bioptato arba dvylikapirštės žarnos, tyrimui naudojant atkarpas surinktas endoskopiniu metodu iš prievartčio bei skrandžio kūno, kurių išvaizda atitinka normalaus audinio išvaizdą. Atkarpos turi būti renkamos gydytojo kabinete.

TESTŲ ATLIKIMAS

Testą reikia atlikti iš karto po atkarpų surinkimo.

1. Atidarykite testą pastumiant judančią dalį pagal rodyklę.
2. Uždėkite 2-3 gleivinės atkarpas ant popieriaus esančio testo šulinėlyje.
3. Išspauskite audinių skystį iš atkarpų ant popieriaus, taip kad suvilgyti juo minimaliai 50% popieriaus pločio.
4. Uždarykite testą pastumiant judančią dalį pagal rodyklę.
5. Rezultatus vertinkite po 5, 30, 60 minučių pagal spalvotą žiedą aplink šulinėlį.

Popieriaus ritinėlio spalvos pokytis iš geltono per rausvą į amarantą nurodo *Helicobacter pylori* buvimą. Jeigu ritinėlio spalva pasikeičia po kelių valandų, rezultatą reikia vertinti kaip neigiamą.

HELICO DRY – TEST turi būti laikomas sausoje ir tamsioje vietoje iki 40°C temperatūroje. Galiojimo laikas nurodytas ant testo.

Gamintojas: SEMTEX AB tel./fax 22 717 80 79, 698 231 422, el. paštas: semtex_ab@wp.pl
05-530 Góra Kalwaria, ul. Partyzanów 2

Platintojas: MB Euromedika tel./fax 2 151418, el. paštas: info@diagnostikostestai.lt
T. Ševčenkos 16, korp 2, LT-03111 Vilnius, Lietuva