

CUSPER™

NARKOTIKŲ TYRIMO RINKINYS



Procedure Card for IDT3400

SINTETINIŲ KANABINOIDŲ IDENTIFIKAVIMAS


Medžiagos ir pėdsakų testas

**Read
Before
Use**

Naudokite atsargumo priemones - pirštines ir akių apsaugą.
Išsiliejimo atveju, nedrįskite testo dalių.
Saugoti nuo vaikų.

Testo atlikimo procedūra	1	Ištraukite antgalį iš testo korpuso	Paimkite įtariamą medžiagą mėginį.	
		Augalinė medžiaga Smart-Tip™ antgaliu palieskite mėginį. Įsitikinkite, kad Smart-Tip™ antgalis visiškai padengtas medžiaga	Balti milteliai Smart-Tip™ antgaliu palieskite mėginį.	

Testo atlikimo procedūra	3	Įdėkite antgalį į korpusą ir tvirtai uždarykite	Identifikavimas	4	Paspauskite kapsulę 1 užpakalinėje korpuso pusėje, kol sulūš.	5	Plakite 2-3 sekundes, kad prasidėtų reakcija.
		STOP Nebetęskite, jeigu mėgintuvėlis užrakintas žemiau Flex Pins ir negali būti ištrauktas.					

Testo rezultatai		Geltonos spalvos atsiradimas byloja apie Sintetinio kanabino aptikimą, pvz.: Naftoilindolai: JWH - 007, 011, 015, 016, 018 , 019, 020, 022 , 072, 073 , 081 , 098, 122 , 133 , 180, 182, 200, 210 , 213, 398, 424. Benzoilindolai: AM - 223, 694 , RCS - 4 . Naftoilpirolai: JWH - 030, 031, 145, 147, 307, 309, 368, 369, 370.
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jei nepasirodo geltona spalva, minėtų medžiagų nėra.

* Testas nereaguos į toliau nurodytas medžiagas:

Klasikiniai kanabinoidai: THC, kitas kanapių sudedamąsias dalis ir jų struktūriškai giminingus sintetinius analogus, pvz. HU-210, AM-906, AM-411, O-1184.


Neklasikiniai kanabinoidai: cikloheksilfenoliai arba 3-arilcikloheksanoliai, pvz.: CP-47, 497-C8, CP-55,940, CP-55,244.


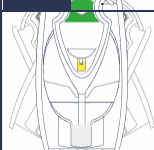
Fenilacetilindolai: pvz.: JWH - 203, 250.



Pereikite prie skiedimo (6–9 žingsniai), neatsižvelgiant į tai, ar atsirado spalva, ar ne.

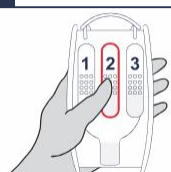

Praskiedimas	6	Paspauskite kapsulę 2 užpakalinėje korpuso pusėje.	7	Švelniai plakite 2-3 sekundes.
			Palaukite 5 minutes. Bandymo kapsulė sušils. Tai yra normalu.	

Praskiedimas	8	Paspauskite kapsulę 3 užpakalinėje korpuso pusėje, kol sulūš..	9	Švelniai plakite 2-3 sekundes.
			Bandymo kapsulė sušils. Tai yra normalu.	



Šalinimas

Po praskiedimo bandymo rinkinį saugu išmesti į šiukšlinėdžę.

01-19

IDenta
World Leader in
Forensic Products

Pagaminta IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Patentuota technologija
Pagaminta Izraelyje