

ĮVADAS

EVIDENCE® nėštumo testas yra namų sąlygomis greitai atliekamas testas, skirtas nustatyti hCG (žmogaus chorioninio gonadotropinio hormono) kiekį šlapime ir diagnozuoti nėštumą.

DĖŽUTĖS TURINYS


Vienoje dėžutėje yra EVIDENCE® nėštumo testas ir jo naudojimo instrukcija, supakuota hermetiškai užklijuotame aliumininiam maišelyje su vienu drėgmę sugeriančiu paketėliu. Drėgmę sugeriančio paketėlio nenaudokite.

TESTO PRINCIPAS

EVIDENCE® yra greitas kokybinis testas, skirtas aptikti žmogaus chorioninį gonadotropinį hormoną šlapime.

Tik per 5 minutes galima aptikti hCG, kai jo kiekis siekia 25 mIU/ml.

Jeigu hCG nėra, testo vertinimo langelyje spalvota juostelė neatsiranda, tačiau kontrolės langelyje matoma spalvota juostelė.

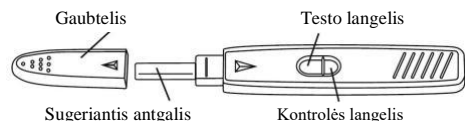


ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Šis testas yra skirtas naudoti tik diagnostikai *in vitro* sąlygomis. Tik išoriniam naudojimui. NENURYTI.
2. Šis testas yra supakuotas į sandarų aliuminio paketį, kuriame yra sausiklis. Neatidarykite sandraus aliuminio paketo iki testo panaudojimo. Nenaudokite sausiklio.
3. Prieš atlikdami testą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Testo rezultatai yra patikimi tik tuo atveju, jei buvo kruopščiai laikomasi nurodymų.
4. Laikykite nuo +4° C iki +30° C temperatūroje. Neužšaldykite.
5. Nenaudokite pasibaigus tinkamumo naudoti laikui, atspausdintam ant aliuminio paketo arba išorinės pakuotės, arba jei aliumininis paketas yra pažeistas.
6. Nenaudokite EVIDENCE® pakartotinai.
7. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
8. Po naudojimo, visi komponentai gali būti išmesti.

TESTO ATLIKIMO PROCEDŪRA



1. Išimkite EVIDENCE® nėštumo testo plokštelę iš folijos pakuotės. Mažą drėgmę sugeriantį paketėlį išmeskite.
2. Nuimkite gaubtelį ir sugeriantį antgalį 5–10 sekundžių palaikykite po šlapimo srovę.
3. **Gaubtelį uždėkite atgal** ant EVIDENCE® nėštumo testo plokštelės.

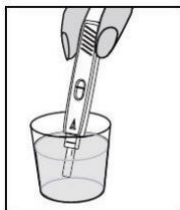


Jei Jums patogiau, šlapimą galima surinkti į švarų ir sausą indą, kuriame nėra jokių nuosėdų, ir mažiausiai 10 sekundžių į šlapimą įmerkinti sugeriantį antgalį, kad jis visas įmirktų. **Jeigu nėštumo trukmė labai trumpa, naudokite pirmąjį rytinį šlapimą.**

4. Testo plokštelę padėkite ant sauso plokščio paviršiaus, kad abu langeliai būtų viršuje. Testo rezultatai bus matomi langelyje, juos galima vertinti po 5 minučių. Rezultato negalima vertinti praėjus daugiau kaip 10 minučių.

REZULTATŲ VERTINIMAS

Palaikite maždaug 5 minutes ir įvertinkite testo rezultatus. Per 5 minutes kontrolės langelyje (mažesniajame langelyje) atsiras juostelė. Rezultatus galima vertinti, kai kontrolės langelyje atsiranda juostelė.

Teigiamas testo rezultatas: nėštumas

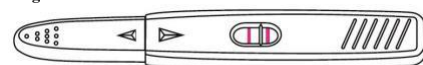

Atsiranda dvi rausvos/rožinės spalvos juostelės: viena kontroliniame langelyje ir viena testo langelyje. Testo rezultatas yra teigiamas ir rodo, kad Jūs esate nėščia.

Pastaba: Viena juostelė gali būti tamsesnė už kitą. Abi juostelės gali būti bet kokio rausvo-purpurinio atspalvio ir gali būti šviesesnės ar tamsesnės už kontrolinę juostelę. Tačiau Jūs turite matyti dvi aiškias lygiagrečias juosteles.

Neigiamas rezultatas: nėštumo nėra



Atsiranda tik viena rausvos/rožinės spalvos juostelė kontrolės langelyje (mažesniajame langelyje), o testo langelyje (didžiausiam langelyje) juostelė neatsiranda. Testo rezultatas yra neigiamas ir rodo, kad Jūs nesate nėščia.

Nevertinamas rezultatas:



Testas yra nevertinamas, jeigu testo plokštelės kontrolės langelyje neatsiranda spalvota juostelė (net jeigu juostelė atsiranda testo langelyje). Tokiu atveju rekomenduojama testą atlikti su nauja EVIDENCE® testo plokštele arba paimti šviežią šlapimo mėginį.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kaip veikia EVIDENCE® nėštumo testas?

Moteriali pastojus jos organizme pradeda gaminti žmogaus chorioninis gonadotropinis hormonas (hCG), kuris išskiriamas į šlapimą ir ilgainiui jo koncentracija šlapime padidėja. EVIDENCE® nėštumo testas skirtas aptikti hCG hormoną šlapime. EVIDENCE® nėštumo teste naudojama pora antikūnų specifiniams hCG hormonui nustatymui šlapime, kurio koncentracija yra 25 mIU/ml (nustatyta pagal P.S.O.* nuoroda.) arba aukštesnė. EVIDENCE® nėštumo testas nustato hCG hormoną šlapime.

*Pasaulio Sveikatos Organizacija

Ar aš turiu atlikti testą tam tikru paros metu?

Jūs galite naudoti EVIDENCE® nėštumo testą bet kuriuo metu dieną arba naktį. Tačiau jei nėštumo terminas yra labai trumpas (8–10 dienų nuo pastojimo), rekomenduojama naudoti pirmąjį rytinį šlapimą.

Kada aš turiu atlikti testą?

Kai tik menstruacijos vėluoja vieną dieną.

Ar išgertas skysčių kiekis turės įtakos rezultatams?

Didelis išgertų skysčių kiekis gali praskiesti šlapimą, todėl gali būti sudėtingiau aptikti hCG. Todėl rekomenduojama vartoti įprastą skysčių kiekį.

Ką daryti, jei man atrodo, kad testo rezultatai yra neteisingi?

Jei Jūs nepavyksta nustatyti, ar ovaliame testo langelyje yra juostelė, testą pakartotinai atlikite po 2–3 dienų naudodami naują EVIDENCE® nėštumo testo juostelę. Jeigu testo rezultatas bus teigiamas, atsiras tamsesnė juostelė nei anksčiau atliekant testą.

Jei laikysitės nurodymų, Jūsų testo rezultatai bus tikslūs. Dėl tam tikrų vaistų, kurių sudėtyje yra hCG arba kurie vartojami kartu su hCG (pavyzdžiui, *Pregnyl*, *Porfasi*, *Pergonal*), ir retai diagnozuojamos medicininės būklės gali atsirasti klaidingai teigiamas rezultatas. Alkoholis, analgetikai, antibiotikai, kontraceptinės tabletės, hormonų preparatai, kuriuose yra klomifeno citrato (pavyzdžiui, *Clomid*, *Serophen*) arba skausmą malšinantys vaistai testo rezultatui įtakos neturi.

Testo rezultatas gali būti klaidingai teigiamas, jei per paskutiniąsias 8 savaites Jūs patyrėte persileidimą, darėte abortą ar pagimdėte. Taip gali atsitikti dėl to, kad dėl buvusio nėštumo testas gali aptikti Jūsų organizme esantį hCG.

Aš sugeriantį antgalį šlapime palaikiau ilgiau nei 10 sekundžių. Ar mano gautas rezultatas vis tiek bus tikslus? Taip. Kelios papildomos sekundės rezultatui įtakos neturi.

Aš sugeriantį antgalį šlapime palaikiau trumpiau nei 5 sekundes. Ar mano gautas rezultatas vis tiek bus tikslus? Ne, nes šlapimo mėginio tūris gali būti per mažas.

Ką reikšia, jeigu testo langelyje atsiradusi juostelė yra tamsesnė arba šviesesnė už juostelę kontrolės langelyje?

Jeigu kiekviename langelyje matote juostelę, testo rezultatas yra teigiamas.

Ką reikia daryti, jei testo rezultatas yra teigiamas?

Jeigu testo rezultatas yra teigiamas, Jūs turite kreiptis į gydytoją ir su juo aptarti nėštumą bei tolimesnius veiksmus. Kad būtų užtikrinta Jūsų ir Jūsų kūdikio sveikata, labai svarbi ankstyva prenatalinė priežiūra.

Ką reikia daryti, jei testo rezultatas yra neigiamas?

Jeigu testo rezultatas yra neigiamas, labiausiai tikėtina, kad Jūsų šlapime yra nepakankamas hCG kiekis (testu aptinkamas hCG kiekis yra ne mažesnis kaip 25 mIU/ml) ir Jūs tikriausiai nesate nėščia. Tačiau gali būti, jog Jūs neteisingai apskaičiavote, kada turi prasidėti menstruacijos, ypač jei jos yra nereguliarios. Jeigu menstruacijos neatsiranda per savaitę, testą atlikite pakartotinai. Jeigu testo rezultatas vis tiek yra neigiamas, o menstruacijos neatsirado, Jums reikia kreiptis į gydytoją. Menstruacijos gali vėluoti dėl kitų priežasčių.

O jeigu aš nepalaukiau 5 minučių prieš vertindama rezultatą?

Jeigu testo rezultatą vertinate nepraėjus 5 minutėms, testui atlikti gali nepakakti laiko, todėl testo rezultatas gali būti netikslus. Jeigu kontrolės langelyje atsiranda juostelė, tai reiškia, kad testas yra pabaigtas ir Jūs galite įvertinti rezultatus. NEVERTINKITE rezultatų praėjus daugiau kaip 10 minučių po to, kai sugeriantis antgalis pateko į šlapimą.

Koks yra EVIDENCE testo tikslumas?

Vertinimo atskaitais atskleidžia, kad atliekant testą gauti rezultatai mažiausiai 99 proc. atveju atitinka referentinius metodus atliktų testų rezultatus.

Informacija apie nėštumą ir nėštumo testus:

1. Žiniatinklio informacija: <https://www.health.harvard.edu/womens-health/>
2. Žiniatinklio informacija: <https://medlineplus.gov/languages/french.html>
3. Žiniatinklio informacija: <https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/>

Gamintojas: **VEDA . LAB ...** Rue de l'Expansion - ZAT du Loudeau - Cerisé BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

Medicininė ir farmacinė informacija - +33-2-33-27-56-25

Oficialus atstovas: Euromedika MB. Sevenkos str., 16, block 2, Vilnius LT-03111, Lithuania
Tel./Fax: +370 5 2151418

	Prieš vartojimą perskaitykite instrukcijas	IVD	Skirtas naudoti tik <i>in vitro</i> diagnostikai		Nenaudoti pakartotinai
	Laikyti +4°C iki +30°C temperatūroje	LOT	Partijos numeris		Tinkamumo laikas – iki:
	Gamintojas				

CE
0483